



TURNY ORBIT

Turny Orbit este un sistem de ridicare a scaunului. Acesta rotește scaunul, îl deplasează în exteriorul mașinii și îl coboară atât de mult cât este necesar.

Astfel, vă puteți așeza pe scaun din exteriorul mașinii. Apoi, este suficient să apăsați un buton, iar Turny Orbit vă va ridica și vă va deplasa în interiorul mașinii. Transferul într-o mașină înaltă poate fi foarte dificil sau chiar imposibil. Cu toate acestea, Turny Orbit nu este destinat exclusiv utilizatorilor de scaune rulante.



Intrați sau ieșiți din mașină? Comanda manuală intuitivă, cu 2 butoane, a sistemului Turny® Orbit este etichetată clar și ușor de utilizat.



Cu o rază maximă de acțiune de 480 mm, Turny Orbit este sistemul nostru de ridicare a scaunului cu cea mai mare rază de acțiune.



Există, de asemenea, un mare avantaj din punct de vedere social atunci când copilul dumneavoastră este aproape de dumneavoastră, pe scaunul din față.



La rotirea în exterior și în interior, puteți lăsa picioarele să alunece pe sol până când este momentul să le ridicați peste prag.



La fel ca în cazul tuturor bazelor noastre pivotante și sistemelor de ridicare a scaunului, instalarea este complet reversibilă.



Poziționarea scaunului mașinii în exterior nu este benefică doar pentru adulți. Pentru copiii care doresc să efectueze transferul singuri, aceasta poate face diferența dintre posibil și imposibil.

Informații tehnice

■ Lungime	590 mm
■ Lățime	475 mm
■ Înălțime	165 mm
■ Cursă verticală	300 / 480 mm
■ Domeniu de rotație	0–97°
■ Capacitate de încărcare	170 kg
■ Greutate unitate	60 / 62 kg

■ Test de cicluri	aprobat (10.000)
■ Test de impact	aprobat
■ Test climatic	aprobat
■ Test EMC	aprobat
■ Test de inflamabilitate	aprobat

TURNY ORBIT

Transfer mai ușor de pe și pe scaunul rulant

Prin utilizarea Turny® Orbit, nu doar că aduceți scaunul în exteriorul mașinii, ci îl și coborâți până la nivelul dumneavoastră. Astfel, transferurile devin și mai ușoare, deoarece puteți efectua întotdeauna transferul către un punct mai jos.

La transferul de pe scaunul rulant, coborâți pur și simplu scaunul mașinii sub nivelul șezutului scaunului rulant. La transferul pe scaunul rulant, opriți coborârea scaunului mașinii deasupra nivelului șezutului scaunului rulant.



Nu este destinat doar utilizatorilor de scaune rulante

Nu este necesar să aveți un diagnostic de dizabilitate pentru a întâmpina dificultăți la așezarea în mașină. Cu scaunul poziționat în exteriorul mașinii, așezarea devine la fel de ușoară ca atunci când vă așezați pe un scaun.

Vă puteți sprijini cu spatele de scaun și lăsa greutatea corpului să facă treaba, coborându-vă în scaun. Vă puteți ține de ușă pentru sprijin. După ce v-ați așezat, Turny® Orbit vă va deplasa în interiorul mașinii.

Montare pe al doilea rând de scaune

Turny® Orbit poate fi instalat la fel de bine și pe al doilea rând de scaune. De fapt, în multe mașini, acesta poate fi chiar cea mai bună alegere pentru instalarea pe al doilea rând.

De exemplu, în Ford Grand C-Max și Citroën Space Tourer, pur și simplu nu există suficient spațiu pentru altceva decât Turny® Orbit.

Siguranță și fiabilitate

Tratăm siguranța cu maximă seriozitate. De aceea, produsele noastre sunt supuse unor teste riguroase. Turny® Orbit a trecut testele de impact, testele în condiții climatice extreme și testele care simulează utilizarea pe întreaga durată de viață a produsului.

Deoarece funcționează alimentat de la sistemul electric al mașinii, dispune de un sistem manual de rezervă care poate fi utilizat în cazul unei întreruperi complete a alimentării electrice a mașinii.

Suntem foarte mândri de acest produs inovator și de fiecare detaliu pe care îl oferă.